

Protocolo de preparación y envío de muestras KIR-HLAC

1. Revise el kit KIR-HLAC y asegúrese de que contiene el siguiente material:
 - 2 tubos EDTA para toma de muestra de sangre.
 - 1 protocolo de preparación y envío de muestras KIR/HLAC.
 - 1 formulario de consentimiento informado.
 - 1 formulario de solicitud de servicios.
2. El genotipado KIR-HLAC es una prueba genética que permite determinar los riesgos de rechazo del embrión por parte del sistema inmune materno. Este test se realiza en el ADN de la pareja. Para ello, se requieren 4 ml de sangre (en tubo EDTA, tapa morada) de cada miembro de la pareja.

NOTA: *En casos en los que la extracción de sangre suponga un inconveniente, se puede considerar la recogida de saliva (por favor, contacte con nosotros para más información). En caso de donación de óvulos o espermatozoides es necesario genotipar HLA-C en el/la donante.*

3. Etiquete los tubos con el nombre de cada paciente o código de identificación y la fecha de nacimiento.
4. Complete el formulario de solicitud de servicios.
5. Complete el formulario de consentimiento informado **incluyendo la firma de los pacientes.**
6. Conserve los tubos refrigerados en nevera hasta el envío.
7. Envíe las muestras a temperatura ambiente en el receptáculo de plástico incluido en el kit, dentro un sobre acolchado o similar utilizando un transporte exprés con entrega al día siguiente.
8. No olvide adjuntar en el sobre la hoja de solicitud y el consentimiento informado, debidamente cumplimentados y firmados.
9. Envíe un e-mail confirmando los detalles del envío a logistics@igls.net

Datos de contacto:

IGLS
Avenida Ansaldo, 12
03540 Alicante
España

Para cualquier duda o consulta, contacte con nosotros a través del correo electrónico lab@igls.net o en el teléfono 618 774 099.