

Protocolo de preparación y envío de muestras ER Map® / MicroBioMap®

1. Revise el kit ER Map® / MicroBioMap® y asegúrese de que contiene el siguiente material:
 - 1 cánula *Pipelle de Cornier*.
 - 1 tubo ER Map® / MicroBioMap® con una solución preservante.
 - 1 protocolo de preparación y envío de muestras ER Map® / MicroBioMap®.
 - 1 documento de consentimiento informado.
 - 1 formulario de solicitud de servicios.
2. Establezca el tipo de ciclo (sustituido, natural o natural modificado) en el que se va a realizar ER Map® / MicroBioMap®.
3. Complete el formulario de solicitud de servicios.
4. Complete el formulario de consentimiento informado **incluyendo la firma del paciente**.
5. Tome la biopsia del fondo uterino en la ventana de implantación:
 - En ciclo sustituido, tras 5,5 días de impregnación de progesterona
 - En ciclo natural, en LH+7
 - En ciclo natural con hCG como desencadenante, en hCG+7

*El primer día de administración de progesterona se considera P+0. El día del pico de LH se considera LH+0. El día de la inyección de hCG se considera hCG+0.

NOTA: Debido a que los resultados del test ER Map® asumen que la progesterona basal es <1ng/ml, es altamente recomendable su medición en sangre antes de comenzar la administración de progesterona en ciclo hormonal sustituido, en LH+0 en ciclo natural y en hCG+0 en ciclo natural modificado.

6. Utilice una cánula *Pipelle de Cornier* incluida en el kit para realizar la biopsia. Es muy importante recoger muestra suficiente para realizar los test. Por favor asegúrese de que toma tejido entre los números 5 y 8 marcados en la cánula, tenga la precaución de que recoge tejido y no mucosa o sangre coagulada.
7. Introduzca la mitad el tejido biopsiado en el tubo ER Map® / MicroBioMap® que se adjunta.
8. Compruebe que el tubo ER Map® / MicroBioMap® está correctamente etiquetado con el nombre y la fecha de nacimiento de la paciente.
9. Agite suavemente el contenido del tubo ER Map® / MicroBioMap® invirtiéndolo 8-10 veces tras la recogida de la muestra.

IMPORTANTE: Conserve inmediatamente el tubo ER Map® / MicroBioMap® en la nevera (refrigerado) durante un mínimo de 4 horas hasta el envío (el cual habrá de realizarse en un máximo de 4 días tras la toma de biopsia).

10. Envíe la muestra (ER Map® / MicroBioMap®) a temperatura ambiente en el receptáculo de plástico incluido en el kit, dentro de un sobre acolchado o similar utilizando un transporte exprés con entrega al día siguiente. Incluya el formulario de solicitud de servicios completado y el documento de consentimiento informado firmado por la paciente.
11. Envíe un e-mail confirmando los detalles del envío a logistics@igls.net.

Dirección de contacto:

IGLS
Avenida Ansaldo, 12,
03540 Alicante
España

Para cualquier duda o consulta, contacte con nosotros a través del correo electrónico lab@igls.net o en el teléfono 618 774 099.