

Protocolo de preparación y envío de muestras P1/P2 SpermXpression®

1. Revise el kit P1/P2 SpermXpression® y asegúrese de que contiene el siguiente material
 - 1 criotubo SpermXpression® rotulado en verde
 - 1 formulario de consentimiento informado
 - 1 formulario de solicitud de servicios
2. Tras 2-3 días de abstinencia, recoja mediante masturbación una muestra seminal.
3. Introduzca 250 microlitros de la muestra seminal en el criotubo SpermXpression® que se adjunta.
4. Complete el formulario de solicitud de servicios.
5. Etiquete debidamente el criotubo SpermXpression® con el nombre y la fecha de nacimiento de la paciente utilizando la pegatina que se adjunta.
6. Agite suavemente el contenido del tubo SpermXpression® invirtiéndolo 8-10 veces tras la introducción de la muestra.

IMPORTANTE: Conserve inmediatamente el tubo SpermXpression® en la nevera (refrigerado) durante un mínimo de 4 horas hasta el envío (máximo 4 días).

7. Envíe la muestra a temperatura ambiente en el receptáculo de plástico incluido en el kit, dentro un sobre acolchado o similar utilizando un transporte exprés con entrega al día siguiente. Incluya en el sobre el formulario de solicitud de servicios completado y el documento de consentimiento informado firmado por el paciente. No enviar a temperaturas elevadas.
8. Envíe un e-mail confirmando los detalles del envío a logistics@igls.net

Datos de contacto:

IGLS
Avenida Ansaldo 12
03540 Alicante
España.

Para cualquier duda o consulta, contacte con nosotros a través del correo electrónico lab@igls.net o en el teléfono 618 774 099.